

BRACKET Idea-L

Light Lingual Basse Friction

Biomécanique
Low Friction 2D pour
aligner et niveler les dents
antérieures en quelques
semaines.

Cosmétique orthodontique
du sourire rapide et invisible
pour le traitement des
malpositions légères et
des récidives.



Les verrous de petite
dimension et d'épaisseur
réduite utilisés avec des
ligatures Slide™* assurent
un confort optimal
pour le patient..

Positionnement pratique et
précis grâce au système
de transfert spécifique.

Alternative efficace
aux gouttières
transparentes.



Respect total de la phonétique.
Collaboration minimale du patient.



AVANTAGES :

Des jauges de différentes tailles ont été étudiées pour positionner les brackets linguaux avec 2 méthodes suivant le choix du praticien :

MÉTHODE DIRECTE

- Le bracket est pré-positionné avec sa ligature «Slide» sur la jauge.
 - Cette jauge a été préalablement choisie en fonction de la hauteur de la dent.
 - Après avoir encollé l'intrados du bracket, maintenir l'ensemble en pression sur la dent avec la jauge en appui sur le bord occlusal et photopolymériser.
 - Retirer la jauge en laissant le «Slide» en position ouverte sur les ailettes inférieures du bracket.
 - Le fil sera ensuite placé dans la gorge et le «Slide» verrouillé.
- Cette méthode simple est utilisée facilement pour replacer un bracket décollé en cours de traitement.

MÉTHODE INDIRECTE EN HÉMI-GOUTTIÈRE

Le plâtre n'a pas besoin de préparation spécifique.

- On adapte les brackets montés avec Slide sur les jauges, préalablement ajustées à la bonne hauteur entre le cingulum et le bord occlusal de chaque dent.
- L'intrados du bracket n'est souillé par aucun système de collage, ni pour le positionnement sur le plâtre, ni pour la mise en gouttière. Les qualités rétentes des grilles sont ainsi parfaitement respectées.
- Cette gouttière est une hémigouttière car elle n'englobe que la face vestibulaire et occlusale de l'arcade.
- La partie linguale reste libre, ce qui permet d'ôter tout excès de colle où à la périphérie des brackets avant la polymérisation, phase impossible avec une gouttière standard.

Protocole de préparation et de collage indirect



Utilisation possible d'une pince mosquito pour positionner le Slide sur le verrou IDEAL


Choisir la hauteur de jauge



Placer la ligature puis clipser la jauge dans la gorge du verrou

Pression sur la jauge

Bien clipser la jauge dans le slot

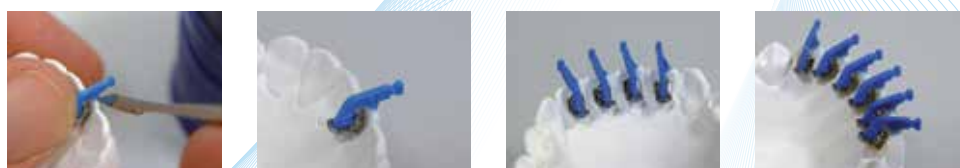

Cire collante sur bord incisif

Vérifier les axes




Préparation de la gouttière

Ne pas englober les brackets

Retirer la gouttière

Séparation par quart

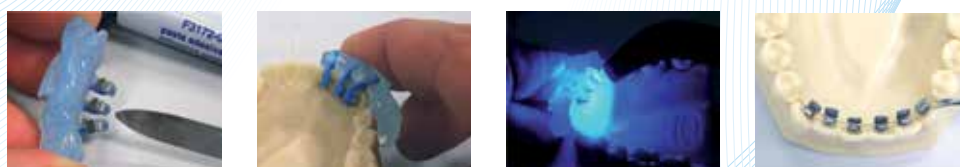

Appliquer composite pour collage en bouche

Ajustage en bouche

Photopolymériser en bouche


Retirer la gouttière



Ne rien inscrire sous celle-ci

Ne rien inscrire sous celle-ci

Les slides sont en place

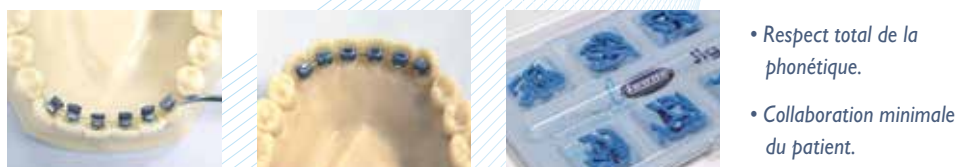

Positionner le fil

Fermer les ligatures slide

Kit de jauge (6 tailles)



- Respect total de la phonétique.
- Collaboration minimale du patient.
- Traitement invisible, simplifié des malpositions légères et des récidives.
- Positionnement pratique et précis grâce au système de transfert spécifique.
- Alternative efficace aux gouttières transparentes.